

## TEST DE 5 DROGAS + ALCOHOL FORMATO COPA

La copa multidroga brinda resultados precisos en 5 minutos, utilizando anticuerpos para detectar drogas y metabolitos con alta sensibilidad. Ofrece una precisión del 95 al 99%, según la sustancia. Es una alternativa rápida y confiable a los laboratorios, ideal para la detección.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



| Sustancia             | Periodo de detección         | Punto de corte |
|-----------------------|------------------------------|----------------|
| Cannabis (THC)        | 2 a 56 hrs hasta 3 a 10 días | 50 ng/ml       |
| Cocaína (COC)         | 4 hrs hasta 24 a 49 hrs      | 150 ng/ml      |
| Anfetaminas (AMP)     | 2 hrs a 24 hrs               | 500 ng/ml      |
| Opiáceos (OPI)        | 2 hrs hasta 4 días           | 2.000 ng/ml    |
| Benzodiacepinas (BZO) | 2 hrs hasta 3 a 7 días       | 200 ng/ml      |
| Alcohol (ALC)         | 30 min hasta 24 hrs          | 0.02%          |

**PERMITIR QUE EL TEST MIDSTREAM, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST**

Advierta a la persona que se va a realizar el test de que **NO** se introduzca nada en la boca: comida, bebida, chicle o tabaco, al menos en los 10 minutos previos a la toma de la muestra.

### INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

**NEGATIVO:** Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C) y otra en la región del test (T). Este resultado indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.

**NOTA:** La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

**INVÁLIDO:** No aparece la línea de color en la región de control (C). Esto puede deberse a un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto. Revisa el procedimiento y repite el test.



VISITA NUESTRA WEB Y REVISANUESTROS PRODUCTOS