

## TEST DE 5 DROGAS FORMATO LÁPIZ

Test saliva lápiz es un dispositivo rápido para la detección cualitativa simultánea de multi-drogas y sus metabolitos en saliva humana.

(OPI/COC/AMP/MET/THC)

**Incluye manual de test**

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	4 hrs hasta 14 hrs	50 ng/ml
Cocaína (COC)	5 a 10 min hasta 24 hrs	20 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml
Opiáceos (OPI)	7 hrs hasta 21 hrs	40 ng/ml
Metanfetaminas (MET)	5 a 10 min hasta 72 hrs	50 ng/ml

**PERMITIR QUE EL TEST MIDSTREAM, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST**


Advierta a la persona que se va a realizar el test de que **NO** se introduzca nada en la boca: comida, bebida, chicle o tabaco, al menos en los 10 minutos previos a la toma de la muestra.

### INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

**NEGATIVO:** Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C) y otra en la región del test (T). Este resultado indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.

**NOTA:** La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

**INVÁLIDO:** No aparece la línea de color en la región de control (C). Esto puede deberse a un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto. Revisa el procedimiento y repite el test.

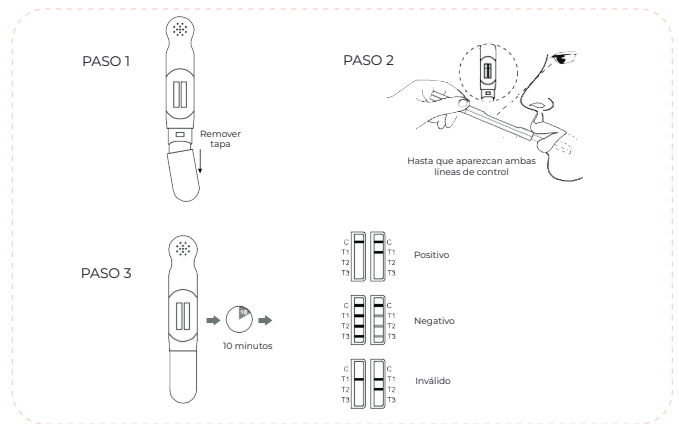

**Leer los resultados a los 10 minutos.** No leer resultados pasada una hora. Lea el resultado del indicador de alcohol (Cuando incluye el indicador ALC en la prueba) de 3 a 5 minutos.

**POSITIVO:** Aparece una línea de color en la región de Control (C), pero no aparece línea de color en la región del test (T). Este resultado debe considerarse positivo.



**VISITA NUESTRA WEB Y REVISANUESTROS PRODUCTOS**